

# GREEN&CLEAN WK

## Anwendung mit der Dosierhilfe



1. Bei der Entnahme aus der Verpackung Handschuhe tragen



2. Das Garantieband entfernen (Hautkontakt mit dem Steigrohr vermeiden)



3. Den Aufsatz (samt Steigrohr) fest auf der GREEN&CLEAN Flasche anbringen \*



4. Zum Dosieren den Deckel öffnen und Flasche leicht drücken (s. Dosiertabelle unten)



5. GREEN&CLEAN WK in die Flasche füllen und diese an der Behandlungseinheit befestigen



6. Sofort nach jedem Gebrauch verschließen, um den Inhalt vor Verunreinigungen zu schützen

## 2%ige Lösung zur Dekontamination und zum Schutz vor Kalkablagerungen in den wasserführenden Leitungen in einer Dentaleinheit auf Wasserstoffperoxidbasis

**Besonderheiten** breites Wirkungsspektrum, mit Langzeitwirkung  
Vermeidung von Biofilm  
Verhinderung von Kalkablagerungen  
schont Hand- und Winkelstücke  
CE 0044

**Hinweise zur Anwendung** Schutzhandschuhe und -brille tragen  
für eine kontinuierliche Dekontamination muss bei jedem Auffüllen der Wasserflasche erneut GREEN&CLEAN WK hinzugefügt werden (siehe Dosiertabelle unten)  
wenn der Inhalt der GREEN&CLEAN WK-Flasche aufgebraucht ist, ist die Dosierhilfe von der leeren Flasche zu entfernen und direkt auf der neuen Flasche anzubringen  
alle 6 Monate sowie bei starker Verschmutzung ist die Dosierhilfe zu ersetzen  
die Dosierhilfe ist nicht für die Aufbereitung geeignet  
\* die Dosierhilfe ist nur für 750 ml GREEN&CLEAN WK-Flaschen geeignet - für die 1 Liter GREEN&CLEAN WK-Flaschen ist ein Messbecher zu verwenden



### Dosiertabelle

Wasser	GREEN&CLEAN WK	
	Standardentkeimung	Intensiventkeimung**
0,5 l	6 ml	12 ml
1,0 l	12 ml	24 ml
2,0 l	24 ml	48 ml
3,0 l	36 ml	72 ml

\*\*Einwirkzeit für Intensiventkeimung: min. 1 Stunde, max. 12 Stunden